



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, пом. 10
ОГРН 5087746166954 | ИНН 77333670400 | КПП 773301001
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 | БИК 044525555
тел: +7 (495) 504-26-51 (52) | факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> | e-mail: info@med-mos.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кровати функциональные медицинские **F-48** модель **ММ-2012Р**
производства Хэбэй Байцян Медикал Егуипмент Мануфактуринг Со. ЛТД, Китай

Назначение изделия

Механическая неонатальная функциональная кровать со съемной ванночкой предназначена для размещения новорожденного и его транспортировки в пределах родильного отделения.

1. Конструкция кровати

Рама изделия выполнена из стального профиля и покрыта ударопрочной эпоксидной эмалью. Нижняя Х-образная часть рамы закрыта пластиковым кожухом с двумя отделениями для аксессуаров.

Несущая колонна соединяет верхнюю и нижнюю рамы, оснащена газлифтом для регулировки высоты и наклона (положения Тренделенбург и Антитренделенбург). Колонна закрыта мягкой пластиковой гофрой.

Ложе в виде пластиковой ударопрочной кювез-ванночки, полезный размер: 74 см × 40 см.

Матрас односекционный, в гигиеническом защитном чехле.

Колеса сдвоенные, самоориентирующиеся, с возможностью поворота на 360°, имеют шины из полиуретана. Два колеса из 4-х (по диагонали) оснащены индивидуальными тормозами.

ГОСТы	
Соответствие требованиям национальных стандартов	ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4) ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 ГОСТ Р 50267.38-99
Обозначение знака соответствия при сертификации	ГОСТ Р 50460-92

Транспортная маркировка грузовых мест	ГОСТ 14192-96
Транспортировка	Условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69
Упаковка	ГОСТ Р 50444-92
Условия хранения	Группа условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69
Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях	2А по ГОСТ Р 51609-2000

2. Сборка и подготовка к эксплуатации

Кровать поставляется собранной и готовой к эксплуатации.

Проверьте кровать на наличие видимых дефектов или повреждений. При обнаружении повреждений, влияющих на безопасность, немедленно прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.



2.1. Установите пластиковую ванночку на верхнюю раму.

2.2. Уложите матрас в ванночку.

2.3. Проверьте ее работоспособность по всем функциям: подъем, опускание и наклон ванночки.

2.4. Перед началом эксплуатации обработайте поверхность изделия дезинфицирующим раствором или протрите влажной тканью. Кровать готова к эксплуатации.

3. Эксплуатация

3.1. Допустимая распределенная нагрузка на кровать приведена в документе с техническими характеристиками. Запрещено перегружать кровать. Повреждения изделия, полученные в результате превышения нагрузки, не являются гарантийным случаем.

Внимание! Риск повреждения оборудования!

Поломка оборудования, вызванная несоблюдением указанного выше порядка действий или

неправильного использования функций, не является гарантийным случаем. В случае невозможности выполнить требуемые действия, незамедлительно прекратите эксплуатацию изделия и обратитесь в сервисный центр ООО «Медтехника Москва» или иной сертифицированный центр.

Внимание! Риск травмирования или повреждения оборудования!

Обеспечьте достаточное свободное пространство вокруг кровати, исключая контакт при использовании функционала кровати. При подъеме, опускании и наклоне ванночки кровати остерегайтесь попадания конечностей или посторонних предметов между элементами конструкции кровати или кроватью и окружающими предметами.

3.2. Для подъема и опускания ванночки используйте рычаг с упором. Поднимите рычаг вверх и удерживайте, пока регулируете высоту, затем отпустите рычаг.



3.3. Наклон ложа (положения Тренделенбург и Антитренделенбург) регулируется с помощью рычага, расположенного в торце кровати.



3.4. В пластиковом кожухе предусмотрены два отделения для различных аксессуаров.



3.5. Два колеса (по диагонали) имеют рычаг тормоза. Для блокировки колес нажмите на рычаг тормоза. Для разблокировки колеса поднимите рычаг снизу вверх.

⇩ Установка тормоза



Снятие блокировки колеса ⇩



3.6. Пластиковые ручки рамы служат для перемещения кровати.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Производитель оставляет за собой право изменить конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

- Иллюстрации, приведенные в данной инструкции, носят информационный характер и являются ориентировочными. Комплектация и вид изделия могут отличаться от приведенных на фото.

Внимание! Если изделие перестало функционировать и/или персонал не может осуществлять контроль, незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр ООО «Медтехника Москва» или иной сертифицированный центр.

Внимание!

1. Запрещена эксплуатация изделия, если в процессе работы возникают посторонние шумы.
2. Не оставляйте детей без присмотра рядом с изделием.
3. Эксплуатировать изделие необходимо согласно инструкции.
4. Каждый раз перед использованием необходимо производить осмотр изделия на наличие видимых дефектов и повреждений. При обнаружении повреждений, влияющих на безопасность эксплуатации изделия, незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр ООО «Медтехника Москва» или иной сертифицированный центр.
5. Утилизировать изделие после окончания срока службы и упаковку после сборки необходимо согласно правилам и нормам, предусмотренным законодательством страны эксплуатации.
6. Не допускается перемещение кровати за боковые ограждения ванночки.
7. Не допускается перемещение кровати при заблокированных колесах.
8. Не допускается использование кровати вне помещений, перемещение по грунту и другой не соответствующей поверхности.
10. Колеса на кроватях предназначены для их перемещения на короткие расстояния по ровному полу внутри помещения, в котором они установлены. Использование кроватей в качестве каталки, для перемещения между помещениями, по коридорам, перекатывание кровати через препятствия порогового типа расценивается как использование кровати не по назначению и может послужить основанием для отказа в гарантийном ремонте.
11. В процессе эксплуатации кровать следует содержать в чистоте (см. раздел 4 данной инструкции).
12. Запрещается размещение каких-либо предметов или оборудования на раме или ее использование в качестве опоры для человека.
13. В случае, когда необходимо оставить пациента без присмотра, приведите положение кровати в нулевую позицию: ложе расположите горизонтально и опустите в крайнее нижнее положение.

4. Обслуживание, чистка и ремонт

1. Срок гарантии составляет 1 год.
2. Если изделие долгое время не используется, его нужно проверять не реже чем раз в 3 месяца.
3. Механические подвижные части изделия должны обрабатываться смазывающими веществами каждые полгода.
4. Регулярно проверяйте силовые узлы подъемных механизмов на наличие смазки с интервалом не реже 1 раза в 2 недели. При необходимости, но не реже чем 1 раз в 6 месяцев, смазывайте аэрозольной смазкой глубокого проникновения.
5. В случае обнаружения неисправностей см. раздел 5 данной инструкции. Изделие, неисправности которого не могут быть устранены пользователем, должно быть отправлено на ремонт техническими специалистами сервисного центра или возвращено производителю.
6. Запрещается использование изделия с признаками неисправностей.
7. В процессе эксплуатации изделие следует содержать в чистоте, своевременно обрабатывая растворами моющих средств на водной основе или дезинфицирующими средствами. Допускается использовать мягкие моющие средства и дезинфицирующие составы, не содержащие агрессивных химических веществ. Соблюдайте инструкции производителя по использованию средства или состава.
8. Очищайте изделие протирочным материалом (мягкой тканью, микрофиброй, салфетками и т. п.).
9. Используйте достаточное, но не чрезмерное количество воды и/или дезинфицирующего состава. При необходимости удалите лишнее количество воды и состава. Чистить следует, переходя от наименее загрязненных деталей изделия к наиболее загрязненным, периодически промывая или заменяя протирочный материал.
10. После обработки удалите остатки состава и дайте изделию полностью высохнуть перед использованием.

Внимание! Не используйте в качестве протирочного материала абразивные и металлические губки и им подобные приспособления, не применяйте острые предметы, способные нарушить защитный слой, нанесенный на изделие, т. к. это может привести к повреждению изделия и коррозии металлических частей.

Внимание! Не используйте составы для чистки и дезинфекции, содержащие абразивные и/или агрессивные добавки, способные нарушить защитный слой изделия, т. к. это может привести к его повреждению и коррозии металлических частей.

5. Возможные неисправности и их устранение

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Колесо не ставится на тормоз или не блокируется	Не нажат рычаг тормоза на колесе	Нажмите рычаг на колесе. Если блокировка тормоза неисправна, обратитесь в сервисный центр
Не работает механизм поднятия, опускания или наклона ложа	Посторонние предметы, мешающие работе механизма	Уберите посторонние предметы, мешающие поднятию, опусканию или наклону ложа
	Механизм неисправен	Внимание! Не пытайтесь отремонтировать самостоятельно, обратитесь в сервисный центр

Внимание! Если предпринятые действия не помогают устранить неисправность, обратитесь в сервисный центр.

6. Транспортировка и хранение

Изделие должно храниться в хорошо проветриваемом сухом месте, не способствующем образованию коррозии и плесени.

Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими для транспорта данного вида, по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

7. Комплект поставки

- инструкция по сборке – 1 шт.;
- ложе в сборе (пьедестал) – 1 шт.;
- съемная пластиковая ванночка – 1 шт.;
- матрас – 1 шт.;
- колеса – 4 шт.;
- прикроватная тумбочка* (опция), сменное белье* (опция)

*опционально, поставляется в зависимости от пожеланий заказчика и комплектации.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при выполнении требований настоящей инструкции; за исключением быстроизнашивающихся деталей и повреждений, причиненных вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев. При обращении потребителя по гарантии, срок эксплуатации замененных частей не обновляется.

При обращении в Сервисный Центр ООО «Медтехника Москва» в случае неисправности, для более оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом изделии.

Телефон Сервисного Центра ООО «Медтехника Москва»: +7 (495) 5042651

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ г.

Актуальную информацию смотрите на сайте РОСЗДРАВНАДЗОРА

<http://www.roszdravnadzor.ru>

Меры предосторожности

- Строго соблюдайте требования, указания и рекомендации, содержащиеся в данной инструкции по сборке.
- Не оставляйте детей без присмотра рядом с работающей кроватью.
- Перед использованием проверяйте корректность функционирования всех подвижных частей кровати, проверяйте надежность затяжки крепежных элементов и отсутствие ослабленных соединений, убедитесь в отсутствии в помещении помех (мебель, стены, подоконники и т.п.), препятствующих нормальному функционированию кровати.
- Каждый раз перед использованием необходимо производить осмотр изделия на наличие видимых дефектов и повреждений. При обнаружении повреждений, влияющих на безопасность эксплуатации изделия, или при возникновении посторонних шумов в процессе работы незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кровать, указанную на заводской наклейке. Запрещено перегружать кровать. Повреждения изделия, полученные в результате превышения нагрузки, не являются гарантийным случаем.
- Избегайте попадания посторонних предметов и частей тела между движущимися элементами конструкции кровати в процессе эксплуатации, это может привести к травме или повреждению оборудования.

- Тормоза колес стоящей кровати (при наличии) должны быть заблокированы. Разблокировка колес производится только при необходимости перемещения кровати.
- Не допускается перемещение кровати при заблокированных колесах.
- Не допускается перемещение кровати вместе с пациентом, это может привести к травмам.
- Не допускается перемещение кровати за боковые ограждения ванночки.
- Колеса на кровати предназначены для ее передвижения на короткие расстояния по твердому ровному полу внутри помещения, в котором установлена кровать. Не допускается использование кровати вне помещений, перемещение по ее грунту и другой не соответствующей поверхности.
- Во избежание повреждений, избегайте ударов и столкновений кровати с твердыми предметами при ее перемещении.
- Использование кровати в качестве каталки, для перемещения между помещениями, по коридорам, перекатывание кровати через препятствия порогового типа, выбоины в полу и иные большие неровности расценивается как использование кровати не по назначению и может послужить основанием для отказа в гарантийном ремонте.
- Запрещается размещение не предусмотренных конструкцией предметов или оборудования на раме кровати или ее использование в качестве опоры для человека.
- В случае, когда необходимо оставить пациента без присмотра, приведите положение кровати в нулевую позицию: ложе расположите горизонтально и опустите в крайнее нижнее положение.
- В процессе эксплуатации кровать следует содержать в чистоте.
- Если изделие перестало функционировать должным образом и/или персонал не может осуществлять контроль, незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.
- Утилизировать изделие после окончания срока службы и упаковку после сборки необходимо согласно правилам и нормам, предусмотренным законодательством страны эксплуатации.